

Panasonic

Lihashierontalaite (2-kanavainen) Panasonic EW 6021

Panasonic THERAPY stimulaatio -laitteiden uusimmat mallit ovat TÜV-testatut ja saaneet hyväksynnän lääkinnällisiksi laitteiksi (93/42/EEC direktiivin mukaan, TÜV on saksalainen Teknisten Tarkastusten Organisaatio). Tieteelliset testit ovat osoittaneet lihas- ja hermostimulaatiolaitteiden käytön edistävän kehon omien kipua lievittävien aineiden (endorfiinien) tuotantoa, näin ollen mahdollistaen nopean kivunlievityksen.

Panasonic THERAPY -laitetta voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

- Krooninen ja akuutti kipu - *esimerkiksi: selkäkipu, noidannuoli, iskiaskipu, jännittyneisyys, reumakivut, hermosärky*
- Kuntoutus - *esimerkiksi: lihaskudoksen rakentaminen, vaurioitunut tunto lihaksissa ja hermoissa, verenkierron elvyttäminen*
- Urheiluvammat ja venähdykset - *esimerkiksi: tenniskyytänpää, lihasvenähdykset, lihassärky, kipu hartioissa ja nivelissä, jännittyneisyys ja jäykkyys lihaksissa harjoittelun jälkeen*

THERAPY -hoito perustuu hellään tai vahvempaan hermostimulaatioon, jonka sähköimpulssit välittyvät syvälle kudokseen. Valitusta stimulaatiosta riippuen voidaan rentouttaa lihaksia, helpottaa / ehkäistä kiputiloja tai edistää verenkiertoa. Kiputilojen ehkäisemiseksi käytetään niin sanottua porttikonrollimekanismia: kivuntunteen kulkeutuminen aivoihin estetään elektronisen stimulaation vaikutuksella hermoratojen alueilla.

Panasonic THERAPY on erittäin helppokäyttöinen: Sähköä johtavat elektroditynnyt asetetaan alueelle, jossa kivun tai epämukavuuden tunne on suurin. Tämän jälkeen käyttäjän tarvitsee vain valita tarvitsemansa stimulaatio-ohjelma. Käyttäjää voi itse valita hieronnan voimakkuuden. Myös jokainen elektroditynny voidaan sijoittaa käyttäjän tarpeen mukaisesti. Kahdesta kolmeen 15 minuutin THERAPY -hoitoa päivässä on riittävästi pitkäaikaisen kivunlievityksen saavuttamiseksi.

Panasonic THERAPY auttaa ehkäisemään seuraavia:

A. Hermosärky

Tärkein aiheuttaja: vakava, pitkäaikainen hermojen yllirasitus (aiemman sairauksen vuoksi)

1. Kipu, joka kulkee lantiosta varpasiin
2. Selkäkipu (voidaan tuntea myös rinnan alueella)
3. Kipu kasvojen ja leukojen alueilla

B. Nivelkipu

Tärkein aiheuttaja: kuluneet ja väsynneet nivelet iäkkäämmillä henkilöillä, urheiluvammat, ylipaino

C. Krooninen jäykkyys

Tärkein aiheuttaja: riittämätön lihasharjoittelu

Panasonic EW6021

- Havainnollistava näyttö eri ohjelmille
- 2-kanavainen stimulaattori neljällä elektrodilla laaja-alaiseen hoitoon
- 8 automaattista ohjelmaa
- 6 erityyppistä hierontaa
- Syvähieronta -vaikutus 1200Hz: in yltävällä taajuudella
- 20 eri hierontavoimakkuutta
- Maksimivirrankulutus: 95mA
- Pestävät, pitkäkestoiset elektrodit - käyttökerroja noin 400
- Automaattisesti sisäänkelautuva elektrodijohto
- Säilytyskotelo mukana
- Sisältää 4 AA alkaliparistoa
- Takuu: 2 vuotta



4-elektrodinen, moni-impulssinen stimulaatio: sähkövirta kulkee neljän elektroditynnyin välillä kolmeen eri suuntaan. Näin hieronta kohdistuu kipeiden lihasten lisäksi myös ympäröivien, lisäkipua aiheuttavien lihasten alueille.

Laitte ei sovellu raskaana oleville eikä sydämentahdistimen käyttäjille. Lue lisää turvallisesta käytöstä käyttöohjeesta.